


ブラインドモードの患者用資料

Dexcom G6 CGMシステムは、10 日間にわたって 5 分ごとにグルコース値を測定します。あなたの主治医は Dexcom G6 であなたにブラインドモードを適用しました。このため、あなたには自分のグルコース測定値が表示されません。

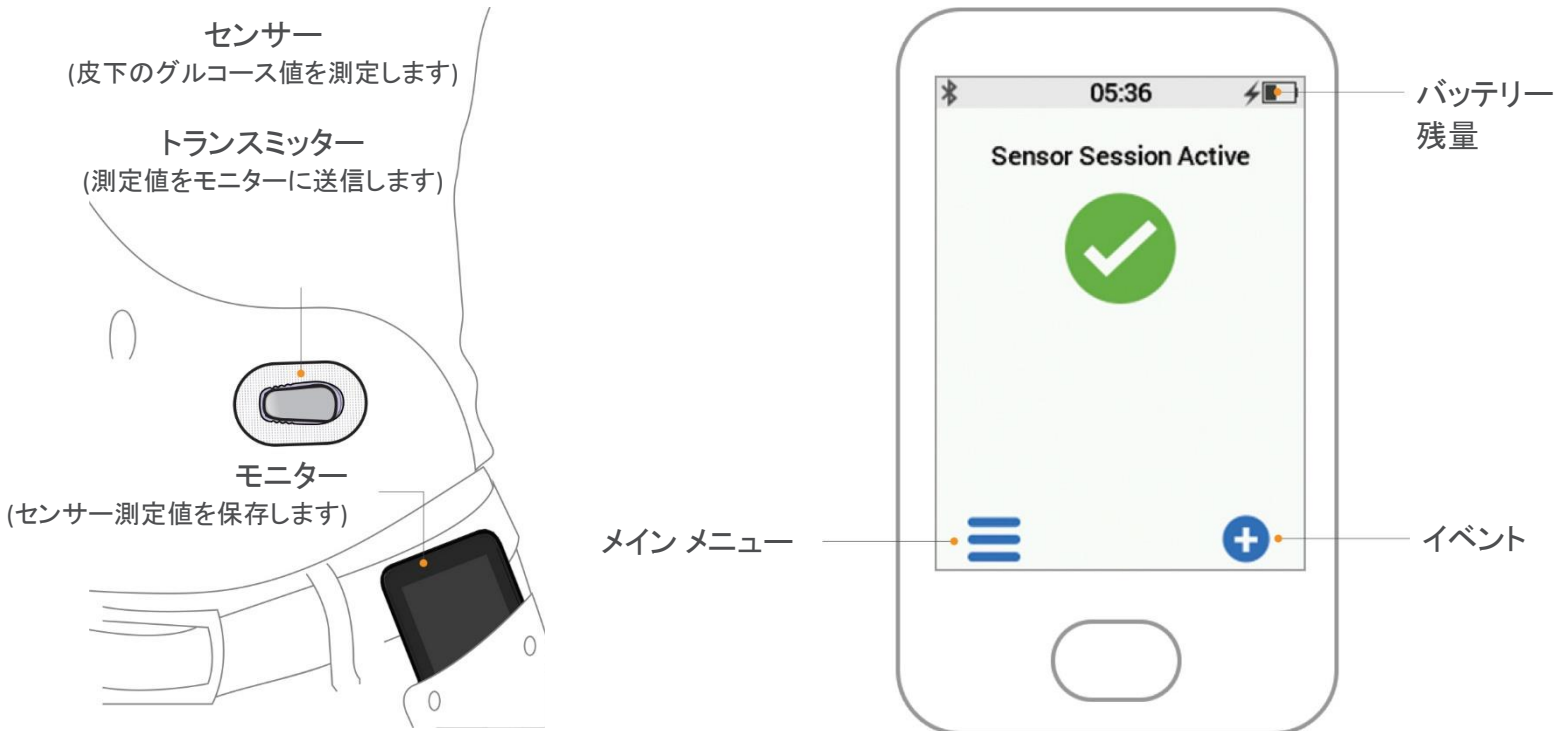

してよいこと、すべきこと

- モニターをトランスミッターから 6 m 以内に保つ
- 通常どおり、シャワーを浴びたり、泳いだりする
- Dexcom システムを返却する

してはいけないこと

- MRI を受けないでください
- CT を受けないでください
- トランスミッターに日焼け止めやローションを塗布しないでください
- トランスミッターを取り外さないでください。取り外すとセンサー セッションが終了します

測定後の手続き

10 日間のセンサーセッションが終了したら、医療従事者に返却します。システムの返却後、医療従事者がグルコース値の履歴を確認し、投薬、食事、または運動を調整する場合があります。

サポート情報

以下の場合、医療従事者に連絡してください:

- Dexcom G6 が緩んだり、外れた場合
- 装着部位の炎症がある場合