

Dexcom CLARITY でモニターをブラインド、または非ブラインドモードにする方法

患者のプライバシーを確保するために、Dexcom CLARITY を使用する際は、それぞれの使用後にモニターをリセットしてください。患者がモニターを使用する間にセンサー情報を表示するか (非ブラインド)、表示しないか (ブラインド) を指定します。Dexcom CLARITY では、次のことができます。

- リセット: すべてのデータを消去し、工場出荷時の設定に戻します。この操作は元に戻せません。
- ブラインド: すべてのグルコース値、矢印、グラフ、およびグルコース値に関連するすべてのアラートおよびアラームが無効になります。
- 非ブラインド: すべてのグルコース値、矢印、グラフ、およびグルコース値に関連するすべてのアラートおよびアラームが有効になります。

医療従事者向け Dexcom CLARITY へようこそ 日本語

1 モニター用 Dexcom Uploader は最新であり、アップロードできます。

Dexcom CLARITY 医療従事者アカウントを使用してログインしてください

ユーザー名 パスワード

[ユーザー名をお忘れの場合](#) [パスワードをお忘れの場合](#)

モニターをリセット、非ブラインドまたはブラインドモードにするには、Dexcom CLARITY (clarity.dexcom.jp) にログインします。

医療従事者向け Dexcom CGM

Dexcom Professional の設定にアクセスするには、以下のことを確認してください。


Dexcom Professional CGM システムはクリニック所有の複数患者用装置であるため、医療従事者だけが設定する必要があります。プロフェッショナル用モニターについて使用可能な設定は次のとおりです。:

- **リセット** - すべてのデータを消去し、工場出荷時の設定に戻します。この操作は元に戻せません。
- **受信停止** - すべての CGM グルコース値、矢印、グラフ、およびグルコース値に関連するすべてのアラートおよびアラームが無効になります。
- **受信停止解除** - すべての CGM グルコース値、矢印、グラフ、およびグルコース値に関連するすべてのアラートおよびアラームが有効になります。


理解しました

キャンセル

[モニターの管理]、[理解しました] の順に選択します。

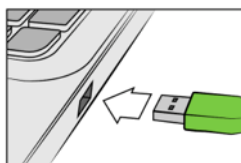

1. USB ケーブルをコンピューターに接続してください。

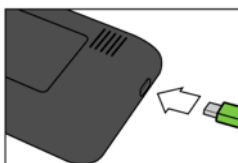

2. ケーブルを、お使いのモニターに接続してください。



3. 電源が入るまでモニターの電源ボタンを長押ししてください。

キャンセル

接続

モニターをPCに接続します。次に、[接続] を選択します。

モニターが USB 経由で接続されると、モニターをリセットまたはブラインド/非ブラインドモードにできます。

本書は、概念を説明することを目的としています。Dexcom G6 CGM システムの使用法の詳細な手順については、取扱説明書を参照してください。

リセット

患者 スタッフ 設定 **モニターの管理** 匿名のアップロード サポート ▼

接続されているモニターをリセットするか、受信を停止します。

- リセットすると、すべてのデータが消去され、モニターは出荷時の設定に戻ります。この操作は元に戻せません。
- 受信を停止すると、すべての CGM グルコース値、矢印、グラフ、およびグルコース値に関連するすべてのアラートおよびアラームが無効になります。

端末: Dexcom モニター
シリアル番号: DX72804049
トランスミッター ID: 80SJBB

キャンセル

受信停止

リセット

リセットを確認します。

このモニターをリセットしますがこの操作によって、まだアップロードされていないデータはすべて消去されます。

端末: Dexcom モニター
シリアル番号: DX72804049
トランスミッター ID: 80SJBB

キャンセル

はい

モニターはリセットされているため、切断することができます。

端末: Dexcom モニター
シリアル番号: DX72804049
トランスミッター ID: 80SJBB

OK

- リセットすると、モニター上のすべてのデータが消去され、設定が出荷時の初期設定に戻ります
- まだアップロードされていないデータはモニターから消去され、元に戻すことはできません
- ユーザーはアクションの確認を求められ、完了メッセージを受け取ります

本書は、概念を説明することを目的としています。Dexcom G6 CGM システムの使用法の詳細な手順については、取扱説明書を参照してください。

ブラインド/非ブラインド

患者 スタッフ 設定 **モニターの管理** 匿名のアップロード サポート ▼

接続されているモニターをリセットするか、受信を停止します。

- リセットすると、すべてのデータが消去され、モニターは出荷時の設定に戻ります。この操作は元に戻せません。
- 受信を停止すると、すべての CGM グルコース値、矢印、グラフ、およびグルコース値に関連するすべてのアラートおよびアラームが無効になります。

端末: Dexcom モニター
シリアル番号: DX72804049
トランスミッター ID: 80SJBB

キャンセル

受信停止

リセット

受信停止を確認します。

このモニターの受信を停止しますか?

端末: Dexcom モニター
シリアル番号: DX72804049
トランスミッター ID: 80SJBB

キャンセル

はい

- Dexcom CLARITY は、モニターがブラインドモードか、非ブラインドモードかを検出します。ブラインドモードのモニターは、[非ブラインド] または [リセット] に設定できます。非ブラインドモードのモニターは、[ブラインド] または [リセット] に設定できます。
- ユーザーはアクションの確認を求められ、完了メッセージを受け取ります

本書は、概念を説明することを目的としています。Dexcom G6 CGM システムの使用法の詳細な手順については、取扱説明書を参照してください。