



トランスミッターを洗浄および消毒する方法

Dexcom G6 CGMシステムを使用した後、および汚れた時は洗浄します。血液や体液が付着した可能性がある場合は、消毒する必要があります。他の人がトランスミッターに触れる前に消毒してください。


トランスミッターの洗浄

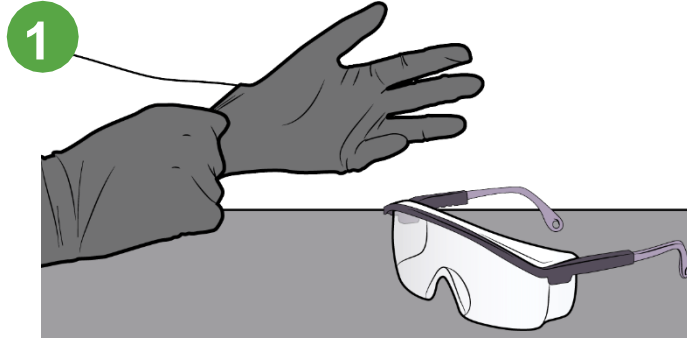


1 清潔な手袋とゴーグルを着用してください。

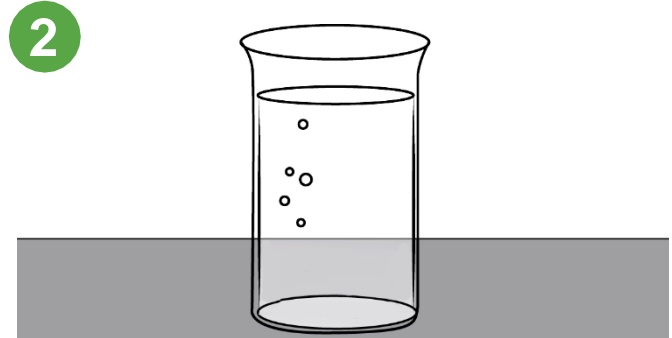


2 トランスミッターを浸すのに十分な深さの容器に、0.65% 次亜塩素酸ナトリウム溶液を準備します。

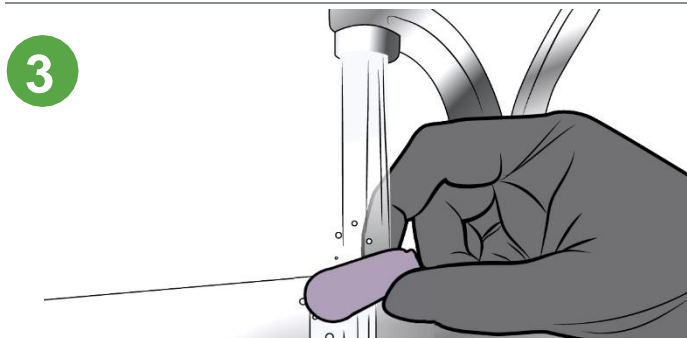


3 目に見える汚れがすべて落ちるまで、柔らかい毛のブラシでブラッシングしながら、冷たい水道水でトランスミッターをすすぎます。

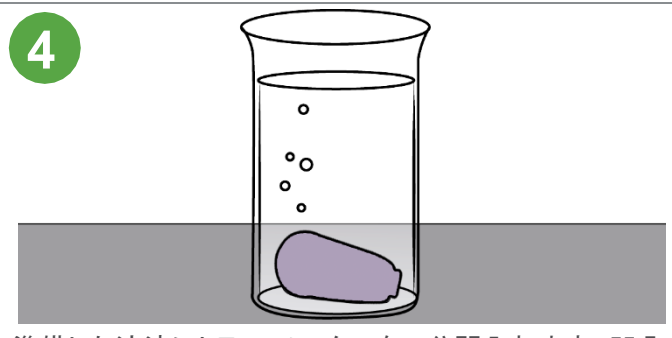

4 準備した溶液にトランスミッターを3分間入れます。凹凸のある部分は、柔らかい毛のブラシでこすり洗います。

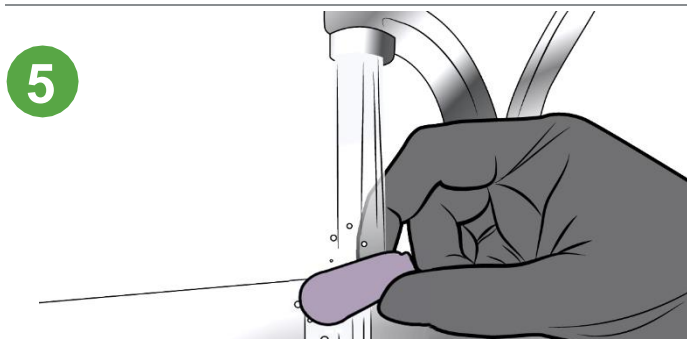

5 トランスミッターを溶液から取り出し、冷たい水道水を流しながら10秒間すすぎます。

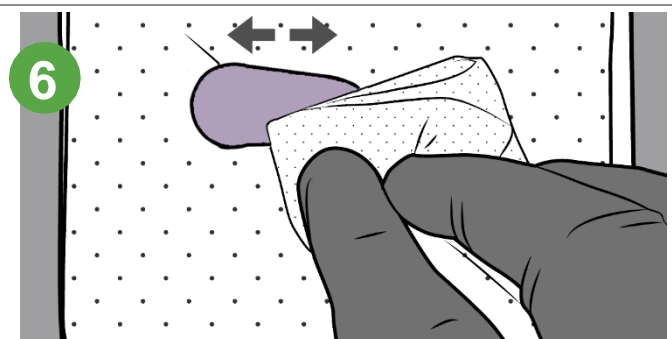

6 トランスミッターを布で拭いて乾かします。目に見える汚れがないことを確認します。目に見える汚れがあれば、再度洗浄します。

トランスミッターの消毒

1. 準備

- 清潔な手袋とゴーグルを着用してください
- 溶液とシリンジを準備します:
 - 硬くて通気性のない表面で使用でき、TB、ノロウイルス、シネトバクター バウマニ、HIV-1、HBV、HCV などの細菌、ウイルス、真菌を 1 分で死滅させるのに効果的な消毒剤/除染剤を使用してください
 - トランスミッターを浸すのに十分な深さの容器に消毒剤/除染剤を入れます
 - シリンジに約 30mL の消毒剤/除染剤を充填します

2. 消毒

- 洗い流す:
 - 凹凸のある部分を集中的に消毒します
 - 消毒剤/除染剤を 10 秒間まわしかけます
 - シリンジを補充します
- こすり洗いする:
 - 清潔な布に消毒剤/除染剤を染み込ませるか、消毒剤/除染剤で拭きます
 - トランスミッター全体を 3 分間以上、またはすべての汚れが除去されるまで拭きます
 - 凹凸のある部分を集中的に消毒します
- 洗い流す:
 - 凹凸のある部分を集中的に消毒します
 - 消毒剤/除染剤を 10 秒間まわしかけます
- 浸す:
 - 準備した溶液にトランスミッターを入れます
 - 30 秒間回転させます
 - その後、さらに 3 分間浸します

3. すすぎと乾燥

- すすぎ: トランスミッターを溶液から取り出し、冷たい水道水を流しながら 10 秒間すすぎます
- 乾燥: トランスミッターを布で拭いて乾かします

本書は、概念を説明することを目的としています。Dexcom G6 CGM システムの使用法の詳細な手順については、取扱説明書を参照してください。