
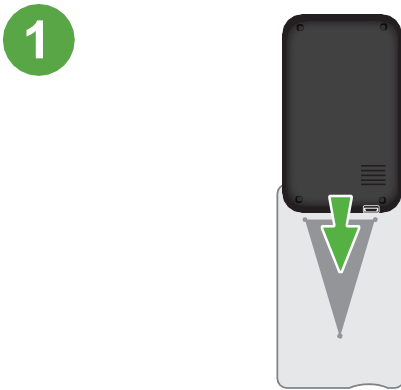


モニター シールドの使用法

Dexcom G6 CGMシステムのモニターでは、消毒の代わりにシールドを使用します。

シールドを付ける前に、モニターを清掃します。


- 清潔で乾いた布を使用します
 - 研磨布、タオル、ペーパータオルは使用しないでください
 - 開口部に水分が入らないようにしてください
 - エアゾールスプレー、溶剤、研磨剤は使用しないでください
- 作業を開始する前に、手を洗って乾かし、手袋を着用します

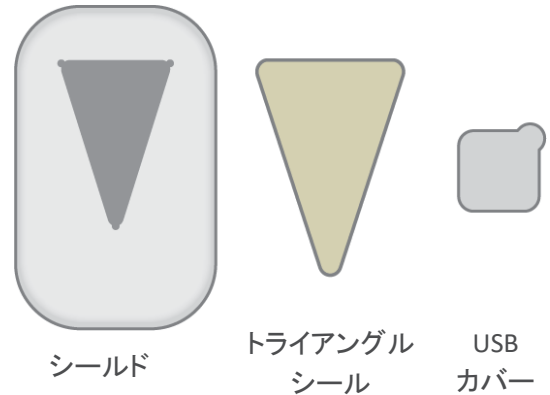


モニターをシールドに合わせて、モニターの画面が開口部の反対側を向き、USBポートがシールドのUSB開口部と合うようにします。モニターをV字型の開口部にスライドさせて挿入します。



モニター上でシールドを伸ばします。

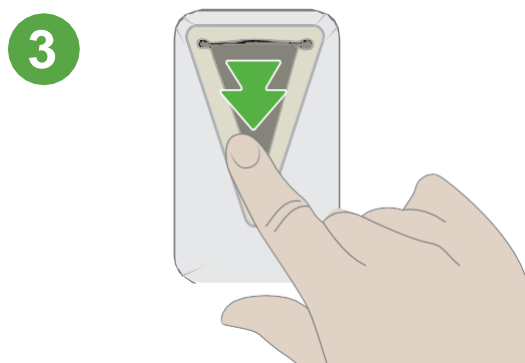

粘着テープの裏紙から三角形のシールを剥がして、モニターの背面にあるシールド開口部の上に貼り付けます。

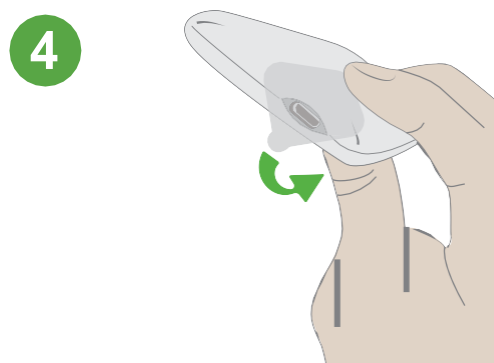

粘着性の裏紙から四角形のシールを剥がして、USB開口部の上に貼り付けてドアを形成します。